

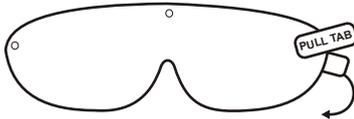


Clear Vision Augenschutzvisier


Bedienungsanleitung

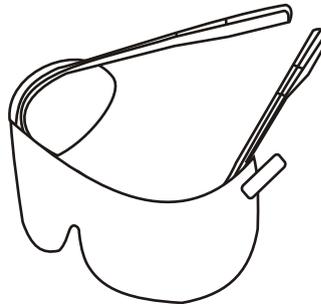

1. Entfernen Sie einseitig die Deckfolie von der Schutzscheibe. Ziehen Sie dafür an der vorgesehenen Haltetasche

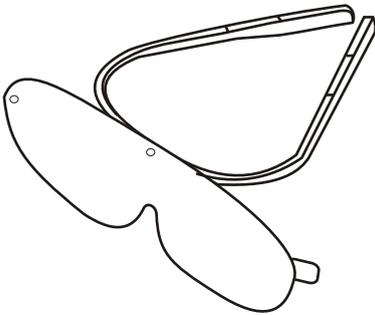

2. Klicken Sie die Schutzscheibe mit der Deckfolie nach aussen auf den Tragbügel, beginnend in der Mitte, dann die zwei äusseren Nocken.

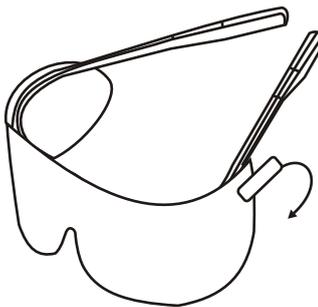

3. Entfernen Sie die zweite Deckfolie von der Aussenseite der Schutzscheibe



Nicht zu folgenden Zwecken verwenden:

zum Schutz gegen einen Aufschlag massiver Gegenstände
zum Schutz gegen brennende, sich zersetzende oder durch chemische Wirkung auflösende Stoffe, wie Säuren oder andere ätzende Substanzen
zum Schutz gegen eine starke Lichtquelle, Gase oder Dünste jeglicher Art
gegen Funken, Bestrahlung oder ultraviolette Strahlen
beim Rauchen oder während jeglicher Tätigkeiten mit oder in der Nähe von Flammen oder wärmespendenden Geräten.

Achtung: bietet keinen ausreichenden Schutz vor Hochgeschwindigkeits-Partikeln gemäss den CE EN166 und ANSI Z87 Normen, entspricht nicht der PSA Richtlinie 89/686/EWG (pers. Schutzausrüstung) und bietet keinen ausreichenden Schutz vor schädlichen oder aggressiven Chemikalien.

erfüllt die europäische Richtlinie 93/42 EWG (Medical Device Directive) und die OSHA requirements for eye and face splash protection per the Bloodborne Pathogen Standard 1910.1030.

Latex-frei
unsteril



MEDICAL

JEM Medical GmbH

Glutz-Blotzheimstr. 1, CH-4500 Solothurn

Tel. +41-(0)32-623 43 55 Fax +41-(0)32-622 17 92

e-Mail: info@jemgmbh.ch web: www.op-produkte.ch