

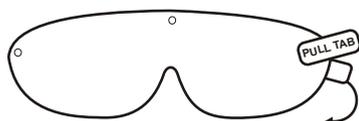


Protection visuelle Clear Vision


Mode d'emploi

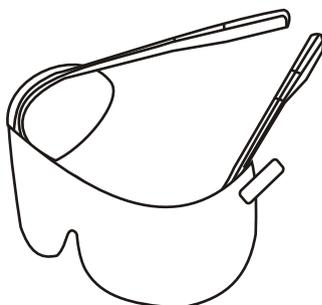

1. Retirer le film de protection d'un côté de l'écran protecteur à l'aide de la languette jointe.

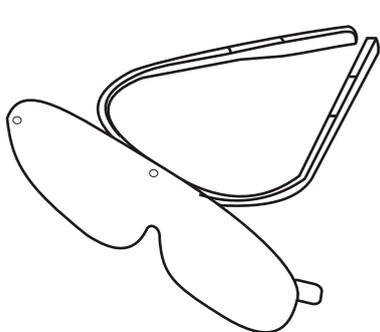

2. Clipper l'écran sur la monture, du côté où le film de protection a été retiré. Commencer par le milieu, continuer par les deux ergots extérieurs.

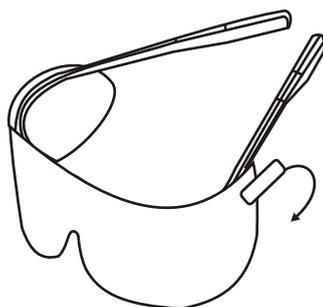

3. Retirer le film de protection du côté extérieur de l'écran.



Ne pas utiliser:

comme protection contre les chocs provenant d'objets solides
comme bouclier contre les substances susceptibles de brûler, d'oxyder ou de dissoudre par action chimique comme les acides ou autres substances caustiques
comme protection contre les éléments suivants: forte source lumineuse, gaz ou vapeurs quelconques, étincelles, radiations ou rayons ultraviolets
en fumant ou en pratiquant des activités impliquant l'utilisation ou la proximité d'une flamme ou d'un équipement produisant de la chaleur

Attention: n'offre pas de protection suffisante contre les particules à haute vitesse selon les normes CE EN166 et ANSI Z87, ne convient pas à la directive EPI 89/686/CEE (équipements de protection individuelle) et n'offre pas de protection suffisante contre les agents chimiques nocifs ou agressifs.

remplit la directive européenne 93/42/CEE (Medical Device Directive) et les exigences OSHA "for eye and face splash protection per the Bloodborne Pathogen Standard 1910.1030".

sans Latex
non stérile



JEM Medical Sarl
Glutz-Blotzheimstr. 1, CH-4500 Solothurn
Tél. +41-(0)32-623 43 55 Fax +41-(0)32-622 17 92
e-Mail: info@jemgmbh.ch site web: www.op-produkte.ch