

Drei Schritte zur Blutentnahme

1 Schutzkappe drehen und abziehen

2 Stechtiefe einstellen

3 Stechhilfe ansetzen und mit Daumen Stich auslösen

REF 03.603.539.150
BEZ Accu-Chek Safe-T-Pro Plus
VPE 200 Stk.
Pharmacode 3747283



Einmalgebrauch



Roche Diagnostics (Schweiz) AG
6343 Rotkreuz
www.roche-diagnostics.ch

ACCU-CHEK®

Leben. So wie ich es will.

Die schmerzarme Einmal-Stechhilfe mit
3 verschiedenen Stechtiefen



ACCU-CHEK® Safe-T-Pro Plus

Kurzanleitung




ACCU-CHEK®

Leben. So wie ich es will.

ACCU-CHEK® Safe-T-Pro Plus

Die innovative Einmal-Stechhilfe mit drei verschiedenen Stechtiefen

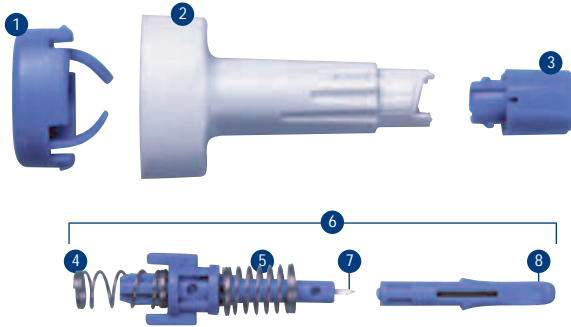

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1 Auslöseknopf | 5 Rückziehfeder |
| 2 T-Form Gehäuse | 6 Lanzette |
| 3 Stechtiefeinstellung | 7 Nadel |
| 4 Antriebsfeder | 8 Schutzkappe |

Vorbereitung des Fingers


Hände in warmem Wasser waschen und gut abtrocknen. Zur besseren Durchblutung den Finger vor dem Stechen eventuell zusätzlich massieren. Einstichstelle desinfizieren und gut trocknen lassen.

Wahl der Einstichstelle

Zur Kapillarblutentnahme sind die Seiten der Fingerbeere am besten geeignet. Dort ist die Blutversorgung am stärksten und die Schmerzempfindung am geringsten.

Wahl der Stechtiefe

Accu-Chek Safe-T-Pro kann auf drei verschiedene Stechstufen eingestellt werden:

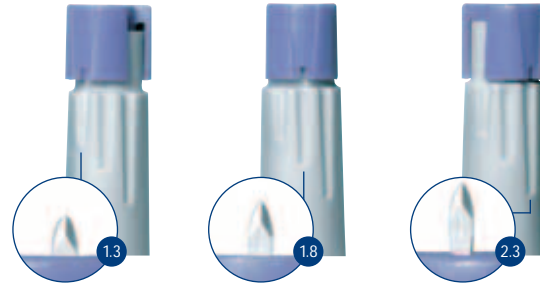

- | | |
|----------------------|--------|
| Geringe Stechtiefe: | 1.3 mm |
| Mittlere Stechtiefe: | 1.8 mm |
| Hohe Stechtiefe: | 2.3 mm |

Empfohlene Stechstufen-Einstellung

- Stufe 1 für zarte Haut
- Stufe 2 für normale Haut
- Stufe 3 für dickere Haut

Nachbehandlung

Fingerbeere mit einem sauberen Tupfer reinigen und eventuell ein Wundpflaster auflegen.

Accu-Chek Safe-T-Pro nach Gebrauch entsorgen.



Geeignete Einstichstellen