


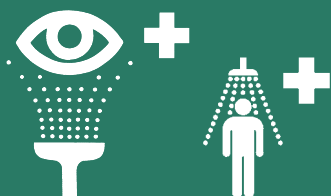

Spüllösungen

Effektive Erste-Hilfe
bei Augen-
und Körperverletzungen



Halte ein **Adlerauge**

auf die Sicherheit, denn wenige Sekunden entscheiden alles!

Das Sehvermögen ist eines unserer wichtigsten Sinnesorgane.

Bei Unfällen können wenige Sekunden darüber entscheiden, ob das Sehvermögen verloren oder beeinträchtigt wird. Deshalb ist der schnelle Zugang zu einer Augenspülflasche für alle Arbeitsplätze erforderlich, wo ein Risiko für Augenverletzungen besteht.

Unfälle mit chemischen Stoffen

Bei Unfällen mit Säuren und Alkali beginnt eine Verätzung des Auges bereits in dem Augenblick, wo der Schadstoff mit dem Auge in Kontakt kommt. Wir empfehlen hier den Einsatz von pH Neutral. Das Produkt enthält eine sterile Phosphatlösung (4,9%) und ermöglicht eine schnelle Neutralisation des Schadstoffes, so dass sich der natürliche pH Wert von 7.4 im Auge schnell wieder einstellt.

Fordern Sie auch unsere ausführlichen Produktinformationen zu pH Neutral an!

Unfälle mit Fremdkörper

Die Zeit ist auch bei mechanischen Schäden, verursacht z. B. durch Metall- und Holzsplitter, Schmutz und Staub, ein wichtiger Faktor. Bei diesen Verletzungen kann durch den schnellen Einsatz der Augenspüllösung verhindert werden, dass sich Fremdkörper im Auge festsetzen und dadurch schwerwiegende Augenschäden auftreten.

Die Plum Augenspülung enthält eine sterile Natriumchloridlösung (0,9%), die dem natürlichen Salzgehalt des Auges entspricht. Der Eintrag von Keimen und Bakterien, welche zu Infektionen im Auge führen können, wird sicher verhindert. Bei der Spülung mit unsterilen Flüssigkeiten (z. B. normales Wasser) ist dies oftmals nicht gewährleistet.

Vorteile des Plum Spülsystems für Ihren Betrieb:

Wirksame Spüllösungen

Beim Eintrag von Fremdkörpern und zum Neutralisieren von chemischen Stoffen im Auge oder am Körper geeignet.

Flexible Systemlösung

Durch unterschiedliche Flaschengrößen und Stationen ist das System für den Einsatz am direkt gefährdeten Arbeitsplatz oder als mobile Lösung geeignet.

Steril und Hygienisch

Ungeöffnet bis zu drei Jahre Haltbarkeit. Es ist keine Wartung und Reinigung der Flaschen erforderlich. Damit können zusätzliche Arbeitszeit und somit Kosten eingespart werden. Das Haltbarkeitsdatum befindet sich auf dem Etikett.

Einfache und schnelle Anwendung


Im Erste-Hilfe-Fall ist die Spülung im Auge oder am Körper innerhalb von wenigen Sekunden möglich. Klare und verständliche Bedienungshinweise mit Text und Piktogramm befinden sich zusätzlich auf dem Etikett.

Hohe Funktionssicherheit

Die ergonomisch geformte Augenschale passt sich dem Auge an und ermöglicht eine weiche sowie gleichmäßige Spülung. Eine CE Kennzeichnung gemäß den Anforderungen an medizinische Ausrüstungen liegt vor. Die Flaschen erfüllen die DIN 12930.

Einfach – sicher – flexibel

www.Arsitec.ch

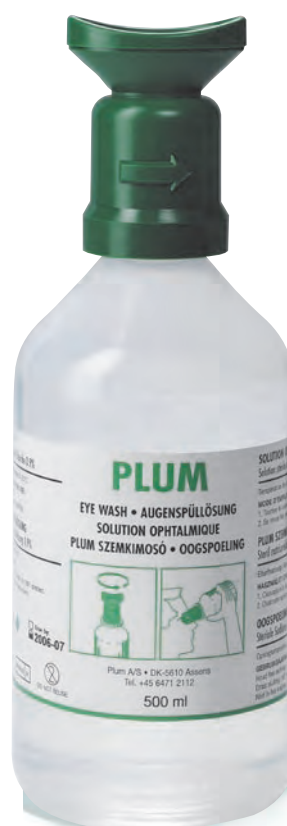

Spüllösungen bei Fremdkörper



500 ml Plum Augenspülflasche



Flasche mit steriler Natriumchloridlösung (0,9 %). Ausgestattet mit einer ergonomisch geformten Augenschale und Staubkappe. Die Flasche ist zur Nachfüllung der Augenspülstationen und für den Einzeleinsatz geeignet. Haltbarkeit: 3 Jahre.

Spülzeit: ca. 5 Minuten
Art.-Nr.: 4604
PZN Nr. 4397402
Versandeinheit: 12 Stück

Gemäß DIN 12930

200 ml Plum Augenspülflasche



Handliche Flasche mit steriler Natriumchloridlösung (0,9 %). Für den mobilen Einsatz z. B. im Werkzeugkasten, Erste-Hilfe Kasten und Aufbewahrung in einer speziell hierfür lieferbaren Gürteltasche. Ausgestattet mit einer ergonomisch geformten Augenschale und Staubkappe. Haltbarkeit: 3 Jahre

Spülzeit: ca. 2 Minuten
Art.-Nr.: 4691
Versandeinheit: 10 Stück
PZN Nr. 4397388

Gemäß DIN 12930

Plum Augenspülstation mit 1 Flasche



Wandstation mit 1 x 500 ml Flasche, Wandhalterung und beiliegendem Piktogramm. Besonders für eine jederzeit schnell verfügbare Augenspülung an kleineren Arbeitsplätzen geeignet.

Spülzeit: ca. 5 Minuten
Art.-Nr.: 4611
Versandeinheit: 1 Stück
PZN Nr. 4397425

Maße Piktogramm:
300 mm H x 90 mm B x 3 mm T
Maße Wandhalterung:
35 mm H x 80 mm B x 57 mm T

Plum Augenspülstation mit 2 Flaschen



Wandstation mit 2 x 500 ml Flaschen, Wandhalterungen und integriertem Piktogramm. Die Station ist zusätzlich mit einem Spiegel ausgestattet und ermöglicht eine besonders korrekte und schnelle Spülung an Arbeitsplätzen, wo eine längere Spülzeit erforderlich ist.

Spülzeit: ca. 10 Minuten
Art.-Nr.: 4694
Versandeinheit: 1 Stück
PZN Nr. 4397431

Maße Wandstation:
290 mm H x 230 mm B x 80 mm T

Plum Augenspülstation in Wandbox



Staubdichte Wandbox mit 2 x 500 ml Flaschen, integriertem Piktogramm und Spiegel. Besonders für den Einsatz an Arbeitsplätzen geeignet, wo Staub und Schmutz anfallen (z.B. Werkstätten). Im Erste-Hilfe-Fall sehr leicht und schnell zu öffnen.

Spülzeit: ca. 10 Minuten
Art.-Nr.: 4650
Versandeinheit: 1 Stück
PZN Nr. 4397448

Hinweis: Beheizbare Wandbox auf Anfrage lieferbar!

Maße Wandbox :
265 mm H x 227 mm B x 110 mm T

Gürteltasche für 200 ml Augenspülflaschen




Die praktische Tasche kann am Gürtel befestigt werden und schützt die Flaschen vor äußeren Verschmutzungen. Im Erste-Hilfe-Fall sehr leicht und schnell zu öffnen. Ausgestattet mit einem Klettverschluss und Kennzeichnung der Augenspüleinrichtung.

Art.-Nr.: 4692
Versandeinheit: 10 Stück
PZN Nr. 4397460

Maße Gürteltasche:
80 mm H x 175 mm B x 85 mm T

Spüllösungen bei chemischen Stoffen

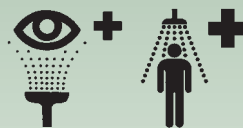

200 ml Flasche pH Neutral



Handliche Flasche mit steriler Phosphatlösung (4,9 %). Für die schnelle Neutralisation von chemischen Stoffen wie z.B. Säuren und Alkali. Für den mobilen Einsatz z. B. im Werkzeugkasten, Erste-Hilfe-Koffer und Aufbewahrung in einer speziell hierfür lieferbaren Gürteltasche. Ausgestattet mit einer ergonomisch geformten Augenschale, Staubkappe sowie leicht verständlichen Anwendungshinweisen auf dem Etikett.

Haltbarkeit: 3 Jahre

Spülzeit: ca. 2 Minuten
Art.-Nr.: 4752
Versandeinheit: 10 Stück
PZN Nr. 4397394

Gemäß DIN 12930

1.000 ml pH Neutral



Flasche mit 1.000 ml steriler pH Phosphatlösung (4,9%), die selbst starke Säuren und Alkali im Auge und auf der Haut schnell und effektiv neutralisiert. Bis zu 50 mal wirksamer als Leitungswasser. Ausgestattet mit einem speziellen Sprühkopf, der eine gleichmäßige Verteilung der Flüssigkeit über eine große Körperfläche gewährleistet. Kann auf dem Arbeitstisch abgestellt oder im Werkzeugkasten, LKW und Kundendienstwagen mitgeführt werden. Auch für die Nachfüllung der Station geeignet.

Haltbarkeit: 3 Jahre
Gemäß DIN 12930

Spülzeit: ca. 2 Minuten
Art.-Nr.: 4746
Versandeinheit: 1 Stück
PZN Nr. 4397419

Augen-Notfallstation



Wandstation mit 200 ml pH Neutral und 500 ml Plum Augenspüllösung, integriertem Piktogramm und Spiegel. Lieferung inklusive Augen-Notfallplan. Besonders für den Einsatz an Arbeitsplätzen geeignet, wo Chemikalien und auch Fremdkörper in das Auge gelangen können. Hinweis: Auch nach der Spülung mit pH Neutral wird eine Fortsetzung der Spülung bis zur ärztlichen Behandlung mit der Plum Augenspüllösung empfohlen.

Maße Station:
290 mm H x 230 mm B x 80 mm T

Spülzeit: ca. 7 Minuten
Art.-Nr.: 4770
Versandeinheit: 1 Stück
PZN Nr. 0622871

Station mit 1.000 ml pH Neutral



Wandstation mit 1.000 ml pH Neutral, Wandhalterung und beiliegendem Piktogramm. Lässt sich an nahezu jedem gefährdeten Arbeitsplatz montieren und benötigt keinen Wasseranschluss. Sinnvolle Ergänzung zu fest installierten Notduschen.

Maße Piktogramm:
300 mm H x 90 mm B x 3 mm T
Maße Wandhalterung:
350 mm H x 50 mm B x 55 mm T

Spülzeit: ca. 2 Minuten
Art.-Nr.: 4741
Versandeinheit: 1 Stück
PZN Nr. 4397454

Augen-Notfallstation




Staubdichte Wandbox mit 200 ml pH Neutral und 500 ml Plum Augenspüllösung, integriertem Piktogramm und Spiegel. Lieferung inklusive Augen-Notfallplan. Besonders für den Einsatz an Arbeitsplätzen geeignet, wo Chemikalien und auch Fremdkörper in das Auge gelangen können und wo Staub und Schmutz anfallen. Hinweis: Auch nach der Spülung mit pH Neutral wird eine Fortsetzung der Spülung bis zur ärztlichen Behandlung mit der Plum Augenspüllösung empfohlen. Hinweis: Beheizbare Wandbox auf Anfrage lieferbar!

Maße Wandbox:
265 mm H x 227 mm B x 110 mm T

Spülzeit: ca. 7 Minuten
Art.-Nr.: 4789
Versandeinheit: 1 Stück
PZN Nr. 0622865

www.Arsitec.ch

Ein flexibles Programm

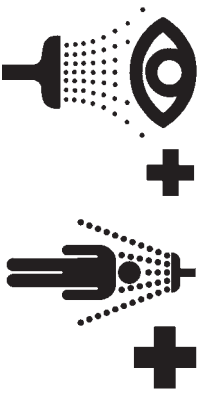

Augen-Notfallplan

SCHMUTZ- UND SCHADSTOFFEINWIRKUNG	EMPFOHLENE SPÜLUNG	FORTSETZUNG DER SPÜLUNG BIS ZUR ÄRZTLICHEN BEHANDLUNG	EMPFOHLENE SPÜLZEIT
Fremdkörper z. B. Staub, Schmutz, Metall- und Holzsplitter	Plum Augenspüllösung	Plum Augenspüllösung	Augen ca. 5 Minuten ausspülen, bis Schmutzstoffe oder Fremdkörper herausgespült bzw. entfernt sind.
Säureschäden	pH Neutral	Plum Augenspüllösung	Augen ca. 2 Minuten ausspülen.
Alkalische Schäden	pH Neutral	Plum Augenspüllösung	Augen ca. 2 Minuten ausspülen.
Sonstige Schäden durch Chemikalien im Auge	Plum Augenspüllösung oder pH Neutral	Plum Augenspüllösung	Augen ca. 2 Minuten ausspülen.
Schäden durch Säuren, Alkali und Chemikalien auf der Haut	pH Neutral	Plum Augenspüllösung	Haut bzw. betroffene Körperteile so-lange spülen, bis das unangenehme Gefühl nicht mehr spürbar ist.

Wichtig!

Mit dem Augen-Notfallplan wird die Gefährdungsanalyse in Ihrem Betrieb deutlich erleichtert. Der Augen-Notfallplan zeigt Ihnen leicht und übersichtlich, wie eine optimale Spülung bei den unterschiedlichen Schmutz- und Schadstoffeinwirkungen erfolgen sollte. Außerdem können Sie den Augen-Notfallplan zur Mitarbeiterinformation verwenden und an den gefährdeten Arbeitsplätzen aufhängen.
Der Augen-Notfallplan ist mit Aufhängern bei uns erhältlich!

Schnelle und leichte Anwendung im Notfall!



Die Flasche aus dem Halter herausnehmen.



Die Augenschale in Pfeilrichtung drehen bis die Versiegelung bricht.



Den Kopf zurücklehnen und spülen.

Wichtig:

Bei allen Verschmutzungen soll das Auge mit einem weichen und gleichmäßigen Strahl gespült werden. Die Augenspülflaschen während des Spülvorgangs leicht drücken.

Ärztlicher Rat ist bei jeder Augenverletzung oder -verschmutzung einzuholen. Die Spülung sollte auch während des Transports zum Arzt fortgeführt werden.

Fordern Sie auch unseren Ratgeber für Spüllösungen als Erste-Hilfe-Maßnahme bei Augen- und Körperverletzungen an!



Bei leichten mechanischen Schäden auch nur einfach nach vorne lehnen und spülen.

Arsitec arbeits-
sicherheit &
technik

Arsitec AG

Industrie Neuhof 25
Postfach 562
CH-3422 Kirchberg
fon 034 427 00 58
fax 034 427 00 68
info@arsitec.ch
www.arsitec.ch